


Kurzanleitung

PMH 7000 - Heizung zur Atemgasbefeuchtung von Intersurgical

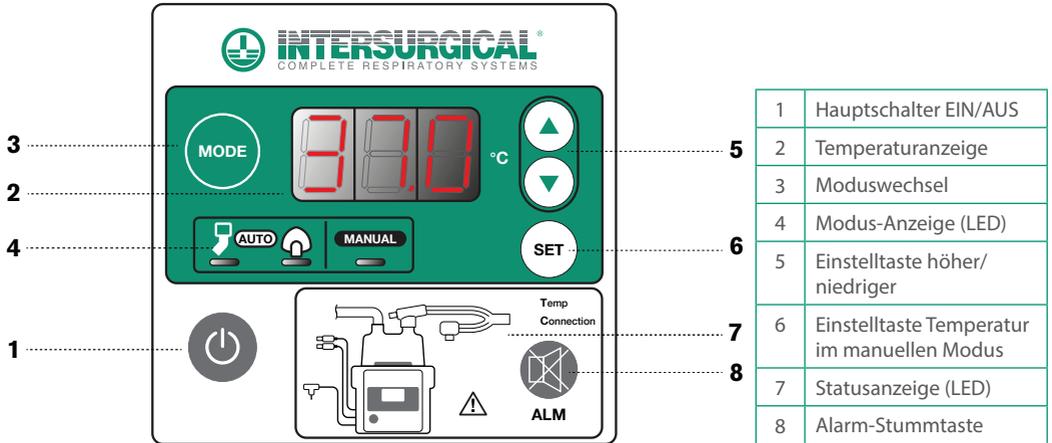

Heizung einschalten durch kurzes Drücken des Hauptschalters (1). Gerät schaltet automatisch in den letzten ausgewählten Modus.

Gewünschten Modus einstellen durch Drücken der Taste Moduswechsel (3). Wiederholen, bis der gewünschte Modus erscheint.

IPPV Modus: Dieser Modus wird für Patienten mit einem Endotrachealtubus verwendet. Bei diesem Modus werden automatisch 40°C als Einstellung für den patientenseitigen Temperaturfühler und 37°C für die Kammertemperatur eingestellt.

NPPV Modus: Dieser Modus wird für Patienten mit NIV-Masken (Non Invasive Ventilation) verwendet. Bei diesem Modus werden automatisch 34°C als Einstellung für den patientenseitigen Temperaturfühler und 31°C für die Kammertemperatur eingestellt.

MANUELLER Modus: Dieser Modus erlaubt die individuelle Einstellung der patientenseitigen Temperatur und der Kammertemperatur. Beachten Sie dazu Abschnitt 5.3.4 der Gebrauchsanweisung.

Temperaturanzeige (2). Das Display zeigt entweder die Kammerauslasstemperatur oder die patientenseitige Temperatur (je nachdem, was ausgewählt wurde). Um die Temperaturanzeige zu wechseln, die Alarm-Stummtaste (8) zwei Sekunden lang gedrückt halten. Nach 10 Sekunden schaltet das Display um.

Alarmfunktion. Ein akustisches Alarmsignal ertönt. Die LED-Statusanzeige (7) auf der Frontblende zeigt den Auslöseort an. Durch Drücken der Alarm-Stummtaste (8) kann der Alarm 2 Minuten lang stummgeschaltet werden.

Wenn der Alarmzustand über einen Zeitraum von 10 Minuten nicht behoben werden konnte, schaltet die Heizung in den Stand-by-Modus und das Display zeigt "000". Schalten Sie die Heizung aus und wieder an, um den Stand-by-Modus zu verlassen.

Wichtig: Diese Kurzanleitung ist kein Ersatz für die vollständige Gebrauchsanweisung. Der Anwender muss dafür sorgen, dass das Gerät korrekt und in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung in Betrieb genommen wird.

Montage des Atemgasbefeuchters. Atemgasbefeuchter sicher befestigen mittels einer geeigneten Halterung. Der Atemgasbefeuchter muss unterhalb der Patientenebene angebracht werden.

Befeuchterkammer auf der Heizung montieren. Kammer rastet mit einem Klicken ein.

Patientenschlauchsystem an die Kammer anschließen. Siehe Beispiel unten.

Befeuchterkammer mit Wasser füllen. Richtlinien des Kammer-Herstellers beachten.

Heizdraht. Sicherstellen, dass die weißen Orientierungspfeile auf beiden Konnektoren in Linie sind. Dann das zugehörige elektrische Adapter-Kabel mit dem schwarz-gelben Steckverbinder am Heizgerät verbinden. Den Kleeblattanschluss am Konnektor des beheizten Inspirations-schlauchs anschließen. Wenn doppelt beheizt, ovalen Konnektor am Konnektor des Expirationsschlauch anschließen.

Dual-Temperaturfühler. Sicherstellen, dass die weißen Orientierungspfeile auf beiden Konnektoren in Linie sind. Temperaturfühler mit dem grün-silbernen Steckverbinder am Heizgerät verbinden. Dann Temperaturfühler in die zugehörigen Ports des Inspirationsschlauch einführen, wie im Diagramm unten abgebildet

Netzkabel an Wandsteckdose anschließen.

Beatmungsgerät (Ventilator) einschalten. Den Ventilator an die Gasversorgung anschließen, einschalten und wie vorgeschrieben eine Druckdichtigkeitsprüfung gemäß Gebrauchsanweisung des Ventilator-Herstellers durchführen.

